


Dräger DrugCheck® 3000 Soluciones para la detección de drogas

Use Dräger DrugCheck® 3000 para averiguar en cuestión de minutos si una persona ha consumido ciertas drogas. Este test en saliva ligero y compacto ofrece resultados fiables de manera fácil e higiénica. El equipo no necesita electricidad, por lo que puede usarse en cualquier parte.

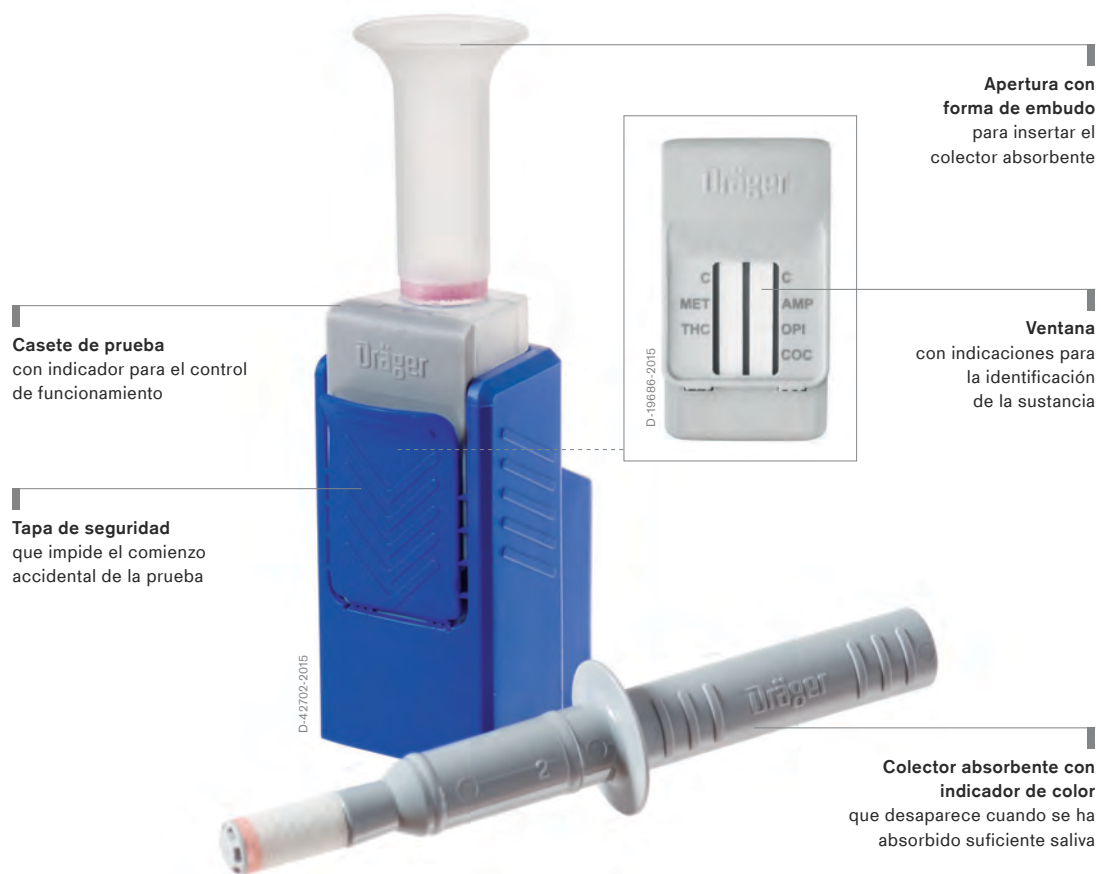

Ventajas

Obtenga muestras de manera fácil y segura

El Dräger DrugCheck 3000 se compone de dos partes: un colector absorbente para obtener la muestra de saliva y un casete de prueba para el análisis. El casete contiene un recipiente de tampón y una ventana con dos bandas que muestra las líneas de prueba y control. El test se realiza en tres pasos simples: recoja la muestra de saliva, agite el kit de prueba, espere un breve período de incubación y comience la prueba. El color del colector desaparece cuando ha absorbido saliva suficiente para la prueba.

En cuanto las líneas de control aparecen en la ventana, ya puede interpretar los resultados. Si el resultado del test es negativo, aparecerá una línea en la clase de sustancia correspondiente (droga), lo que significa que no se ha detectado ninguna sustancia en la muestra. Si no aparece una línea al lado de las clases de sustancias, el resultado es positivo.

Análisis rápido y fiable

Detecte cinco clases de sustancias de manera simultánea con el Dräger DrugCheck 3000: cocaína, opiáceos, anfetaminas, metanfetaminas/drogas de diseño (p. ej. éxtasis) y cannabis (THC). De todas estas clases de sustancias, el cannabis es la droga más consumida y también la más difícil de identificar (THC), por este motivo se ha mejorado el funcionamiento del Dräger DrugCheck 3000 detectar THC y ahora ofrece dos opciones de detección: en función del tiempo de espera elegido (pre-incubación) de la prueba, hay una opción rápida con un punto de corte de THC mayor, o una opción de mayor sensibilidad con un punto de corte de THC menor. La prueba completa solo tarda entre 3 y 5 minutos.

Claridad en la detección de drogas

El diseño compacto de tamaño bolsillo del DrugCheck 3000 facilita su transporte. Además está listo para su uso fácil y rápidamente y es adecuado para aplicaciones de uso flexible como pruebas en carretera y pruebas de seguridad en el trabajo*. El kit de prueba no necesita electricidad, lo que lo hace seguro para su uso en zonas peligrosas.

Más ventajas:

Dräger cuenta con décadas de experiencia en equipos de detección de alcohol y métodos de detección de drogas. Para el DrugCheck 3000, Dräger ha utilizado el principio de funcionamiento del sistema Dräger DrugTest® 5000, que detecta de manera fiable incluso los restos más minúsculos de THC. El kit de prueba desechable DrugCheck 3000 no puede manipularse y es higiénico.

Productos relacionados



D-54720-2012

Dräger DrugTest® 5000

Sin pipeteo, ni goteos, ni control de tiempos: Tomar una muestra de saliva es rápido y fácil con Dräger DrugTest® 5000. La muestra recogida se puede analizar de inmediato para obtener resultados precisos in situ.



D-6296-2009

Dräger SSK 5000

Ideal para la detección rápida de drogas, el sistema de recogida de muestras Dräger SSK 5000 es rápido y fácil de utilizar. Cuando se utiliza con Dräger DrugTest® 5000, la muestra puede transferirse a un casete de prueba para establecer si existe una contaminación por droga. La muestra puede guardarse y transportarse para realizar análisis posteriores.



ST-13226-2007

Dräger DCD 5000

Detección sencilla, rápida y segura de sustancias tóxicas y drogas: Dräger DCD 5000 no solo permite recoger fácilmente muestras de saliva, sino que también pueden guardarse y enviarse al laboratorio para su análisis sin peligro de que puedan manipularse durante el trayecto.



D-4347-2014

Dräger SCK

Para no romper la cadena de custodia, utilice el kit de confirmación con el colector de saliva para la posterior toma de muestras para su análisis en laboratorio, que incluye material de envío.

Especificaciones técnicas

Test para la detección de drogas en saliva

Dimensiones (An x Al x F)	32 x 111 x 57 mm
Peso	< 30 g
Rango de funcionamiento	Funcionamiento: de 5 °C a 40 °C del 5 % al 95 % de humedad relativa
Almacenamiento/transporte:	De 4 °C a 25 °C
Tiempo de medición	Detección rápida: análisis < 3 minutos Detección en modo sensible: análisis < 5 minutos
Seleccionar el modo de medición	Dependiendo del periodo de pre-incubación y el punto de corte para THC seleccionados, medición rápida o de mayor sensibilidad.
Normas / Homologaciones	Aprobado como producto médico en la UE según la Directiva 98/79/CE sobre equipos médicos de diagnóstico in vitro (IVD). Fuera de la Unión Europea para uso no médico (no IVD) o para aplicaciones forenses (solo EE. UU.)

Información para pedidos

Dräger DrugCheck® 3000	Descripción	Referencia de pedido
Test para la detección de drogas en saliva		
Dräger DrugCheck® 3000 STK 5 IVD	20 unidades	83 25 500
Dräger DrugCheck® 3000 STK 5 No IVD	20 unidades	83 25 580
Dräger DrugCheck® 3000 detecta las siguientes sustancias:		
<ul style="list-style-type: none"> - Cocaína (COC) - Opiáceos (OPI) - Cannabis (THC) - Anfetamina (AMP) - Metanfetamina (MAMP) 		

Observaciones

Observaciones

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL

Draegerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

SEDE REGIONAL

PANAMÁ
Draeger Panamá S. de R.L.
Business Park, Torre V, piso 10
Av. De la Rotonda
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

VENTAS INTERNACIONALES

ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836 8310 / Fax -8321

CHILE

Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001

COLOMBIA

Carrera 11a # 98 – 50
Oficinas 603/604, Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

ESPAÑA

Draeger Safety Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente.safety@draeger.com

MÉXICO

Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132

PANAMÁ

Draeger Panamá Comercial
S. de R.L.
Calle 57B, Nuevo Paitilla,
Dúplex 30 y 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

PERÚ

Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL

Draeger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6 - 6A
2790 - 072 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto

