

Especificaciones técnicas

Inmovilizador de cabeza **JSA-363-BF**

Descripción

Instrucciones de uso

Fijación del inmovilizador de la cabeza a la tabla de la columna vertebral

Asegúrese de que el inmovilizador de la cabeza esté desmontado. Debe tener 1 placa base, 2 bloques para la cabeza y 2 correas para la cabeza/mentón. Coloque la placa base contra la parte superior del tablero espinal con las correas adheridas estiradas. Las correas unidas a la placa base pasan por encima y luego a través del asa, pasando la correa entre la tabla y la placa base. Pase la correa a través y sobre la otra manija y sujete la correa al velcro en la placa base. Repita con la segunda correa. Fije la correa de retención en la parte superior de la placa base haciendo un bucle a través del orificio central del tablero espinal. Fije los bloques para la cabeza al velcro y coloque las correas para la cabeza/mentón sobre los bloques y pase los extremos del velcro a través de los anillos en D en la placa base.

Asegurar al paciente en el inmovilizador de cabeza

Coloque al paciente en el tablero de forma que su cabeza quede en el centro de la placa base. Asegure al paciente en el tablero con correas de sujeción. Coloque los bloques de cabeza contra cada lado de la cabeza del paciente. Cuando sea posible, alinee los agujeros en los bloques de la cabeza con los oídos del paciente para que pueda escuchar al paciente. Pase cada extremo de las correas de la frente/mentón a través de los anillos en D. Apriete según sea necesario.

El inmovilizador de cabeza está recubierto de vinilo y es flotante e impermeable. Se puede dejar colocado durante las radiografías.

Aplicaciones

Ideal para usar junto con el tablero JUNKIN JSA-363.

Post-trauma, Fracturas cervicales estables, espondilitis cervical, Columna cervical RA y OA

Disco cervical herniado, Postoperatorio, Enfermedad de la neurona motora, etc.

